

## Provtagningsanvisning- PreBio-prover med hanteringstid ”U2H”

---

### **Allmänt om hanteringstid ”U2H”**

Proverna hanteras omgående vid ankomst till laboratoriet (vid ankomst innan kl. 16:00) och hanteringstiden används vid krav på infrysning inom 2 timmar från provtagning.  
Provtagning sker på provtagningscentral, avdelning eller mottagning på Karolinska Universitetssjukhusen i Solna, Huddinge eller Danderyds Sjukhus.

### **Provtagning**

Proverna får ej tas kapillärt.

Rören måste fyllas tills vakuumverkan upphör, urinrör fylls minst till hälften.

Vänd alla rör 8 – 10 gånger direkt vid provtagningen, blodvagga rekommenderas.

Provtagning sker enligt rekommenderad rörordning för Biobanksprover, se anvisning ”Rekommenderad rörordning Biobank och rörmärkning”.

### **Provhantering**

Proverna skickas omgående till laboratoriet, med undantag för serumrör, som ska stå i rumstemperatur i 30 minuter innan transport för att hinna koagulera.

Tabellen nedan visar de olika trivialnamnen i PreBio-processen tillsammans med motsvarande analyskoder samt information om rörtyper och rörstorlekar för prover som ska hanteras inom 24 timmar (U24H).

Provtagningskärl	Analysnamn i Analytix	Analyskod
Citratrör <b>plast</b> (drar 2,7ml), blå 3,2 ml	U2H CITRATPLASMA - P	BBKZC
	U2H CITRATPL 2 - P	BBKZC2
	U2H CITRATPL 3 - P	BBKZC3
EDTA-rör, lila 5 ml	U2H EDTABLOD - B	BBKZEB
	U2H EDTABLOD 2 - B	BBKZEB2
	U2H EDTABLOD 3 - B	BBKZEB3
EDTA-rör, lila 10 ml	U2H EDTAPL 10ML - P	BBKZE10
	U2H EDTAPL 10ML 2 - P	BBKZE102
EDTA-rör, lila 5 ml	U2H EDTAPLASMA - P	BBKZEP
	U2H EDTAPL 2 - P	BBKZEP2
	U2H EDTAPL 3 - P	BBKZEP3
Li-heparinrör med gel, ljusgrön 5 ml	U2H LIHEPPL GEL - P	BBKZLHG
	U2H LIHEPPL GEL 2 - P	BBKZLHG2
	U2H LIHEPPL GEL 3 - P	BBKZLHG3
	U2H LIHEPPL GEL 4 - P	BBKZLHG4
Na-heparinrör, mörkblå 5 ml	U2H NAHEPPLASMA - P	BBKZNH
	U2H NAHEPPL 2 - P	BBKZNH2
	U2H NAHEPPL 3 - P	BBKZNH3
Röd, koag.aktivator, röd 5 ml	U2H SERUM - S	BBKZS
	U2H SERUM 2 - S	BBKZS2
	U2H SERUM 3 - S	BBKZS3
Röd, koag.aktivator, röd 10 ml	U2H SERUM 10ML - S	BBKZS10
	U2H SERUM 10ML 2 - S	BBKZS102
Gelrör, gul 5 ml	U2H SERUM GEL - S	BBKZSG
	U2H SERUM GEL 2 - S	BBKZSG2
	U2H SERUM GEL 3 - S	BBKZSG3
	U2H SERUM GEL 4 - S	BBKZSG4
Sterilt provrör, PP 10 ml	U2H URIN - U	BBKZU
	U2H URIN 2 - U	BBKZU2