

Lathund, alternativ metod för provtagning för Tuberkulos-Ag, IGRA (Tuberkulos-Ag interferon gamma svar, IGRA)

I första hand ska provet alltid tas enligt ordinarie rutin, se provtagningsanvisning, ”Tuberkulos-antigen, interferon gamma svar (IGRA)”

Använd alternativ rutinen endast i undantagsfall, om svårighet att uppnå korrekt volym med ordinarie provtagning. OBS! Provet får inte tas kapillärt.

<p>Alternativ provtagning Ta 2 st Li-Heparinrör venöst</p>	<p>Prov tas med Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp 5/3 mL</p> <p>Du behöver minst 4,8 mL Heparinblod</p> <p>Blanda rören noga innan överföring till IGRA-rören.</p>	
<p>För över blod till Tuberkulos-Ag, IGRA-rör</p> <p>Ta bort locken från de 4 IGRA-rören</p> <p>Tillsätt, med pipett, 1 - 1,2 mL blod till varje IGRA-rör, upp till det svarta märket på sidan av rören</p> <p>Sätt tillbaka locken ordentligt och blanda/skaka rören, enligt nedan.</p>	<p>Överföring av blod till IGRA-rören måste ske hos provtagaren.</p> <p>Fördelningen ska utföras enligt följande rörordning</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.NIL (grå kork) 2.TB1-antigen (grön kork) 3.TB2-antigen (gul kork) 4.Mitogen (lila kork) <p>Arbeta aseptiskt, relevanta säkerhetsprocedurer måste följas.</p>	 <p>Tuberkulos-Ag, IGRA, 4 rör</p> 
<p>Blanda proverna direkt efter provtagningen</p> <p>Skaka rören upp och ned 10 gånger för hand. När blodet täcker hela rörväggen som en film är hanteringen klar.</p>	<p>Momentet är mycket viktigt eftersom antigen på rörväggens insida måste lösas upp i blodet.</p>	
<p>Information på beställningen Ange klockslag och datum för provtagningen på beställningen/remissen</p>	<p>Inkubering av rören måste påbörjas inom 16 timmar efter provtagningen.</p>	