

Sköljvätska från endoskopdiskdesinfektor, kunder utanför Region Stockholm

Beställning av flaskor och transportkärl (frigolitlåda)

- Vårdgivaren beställer sterila flaskor och transportkärl (frigolitlåda) från egen leverantör.
- Använd Steril flaska av glas eller plast. Det är valbart att använda två 0,5 L flaskor eller en 1 L flaska.

Inför provtagning

- Kontakta Hygienlaboratoriet minst 5 vardagar innan planerad provtagning.
- Sök anvisningen Sköljvätska, Endoskopdiskdesinfektor www.karolinska.se/lab för information om provtagning

Efter provtagning

- Förvara provet kylt innan transport till Karolinska Universitetslaboratoriet Solna. Vid behov ska provet kylas ned före transport.
- Flaskorna ska anlända till laboratoriet inom 24 timmar.
Transportera provet kylt i till exempel frigolitlåda. Transportlådan returneras inte.

Kontaktuppgifter

Hygienlaboratoriet

Telefon 08-123 735 68

E-post: hygien.mikrobiologi.karolinska@regionstockholm.se