

Datum
2022-01-27Diariennr:
KEMI 2022-13

Byte av mätmetod för Inhibin B, S-

Fr o m 2022-02-01 kommer analysen S-Inhibin B att byta mätmetod.

Nuvarande ELISA metod från Beckman Coulter kommer att ersättas med en känsligare ELISA metod från AnshLab.

Detta innebär att referensintervallet kommer att ändras samt att mätvärden, i synnerhet för kvinnor över 51 år, inte kommer att vara fullt jämförbara med den gamla metoden.

Under en övergångsperiod fram t o m 2022-06-30 kommer därför de prover som ligger < 12 ng/L för postmenopausala kvinnor att analyseras parallellt med både gamla och nya metoden så att ett nytt baslinjevärde kan erhållas.

Referensintervall (ng/L)

Beckman Coulter ELISA (äldre utgående metod):

Flickor prepubertalt (medianålder 11 år)	< 85
Kvinnor fertil ålder	< 340
Kvinnor postmenopaus	< 10
Pojkar prepubertalt (medianålder 11 år)	5,0 - 355
Män	25 - 325

AnshLab ELISA (ny metod):

Flickor (< 12 år)	< 183
Kvinnor 13-41 år (follikulär fas)	< 224
Kvinnor 42-51 år (follikulär fas)	< 108
Kvinnor > 51 år (postmenopausala)	< 12
Pojkar < 15 dagar	68 - 373
Pojkar 15 dagar – 6 månader	42 - 516
Pojkar 7 månader – 7 år	24 - 300
Män 8 år – 30 år	47 - 383
Män 31 år – 72 år	< 358
Män > 72 år	Saknas

Anm. Kvinnor 13-51 år (luteal fas): < 80 ng/L.

För upplysningar och förfrågningar hänvisas till:

Inga Bartusevičienė
Överläkare
Tel: 08-517 704 57
E-post: inga.bartuseviciene@sll.se

Ann-Charlotte Bergman
Sjukhuskemist
Tel: 08-517 722 38
E-post: ann-charlotte.r.bergman@sll.se