

BD Vacutainer® Plus-citratrör

Vikten av rätt fyllnadsnivå för BD Vacutainer® Plus-citratrör

Röret är utformat för att säkerställa lämplig fyllnadsnivå. Låt alltid röret fyllas tills blodet upphör att flöda.

För fullständiga instruktioner, se produktens bruksanvisning (IFU). Detta dokument ersätter inte IFU.


Ytterligare vägledning för rörfyllningsnivå:

Fyllnadslinje för minimumnivå: Etsad 360-gradig fyllnadslinje på röret representerar den minsta blodvolym som krävs för analys. Kontrollera att blodnivån är vid eller över den nedre kanten på minimifyllnadslinjen.

Vägledning för fyllnad av maximumnivå: Om ingen blodmenisk visas enligt bilden nedan för 2,7 mL-röret anses röret vara överfyllt.

Om blodmenisk är högre än den nivå som visas i figuren nedan för 1,8 mL-röret anses röret överfyllt. Menisken måste vara minst 3 mm från den nedre kanten på korken enligt figur 1.

Figur 1

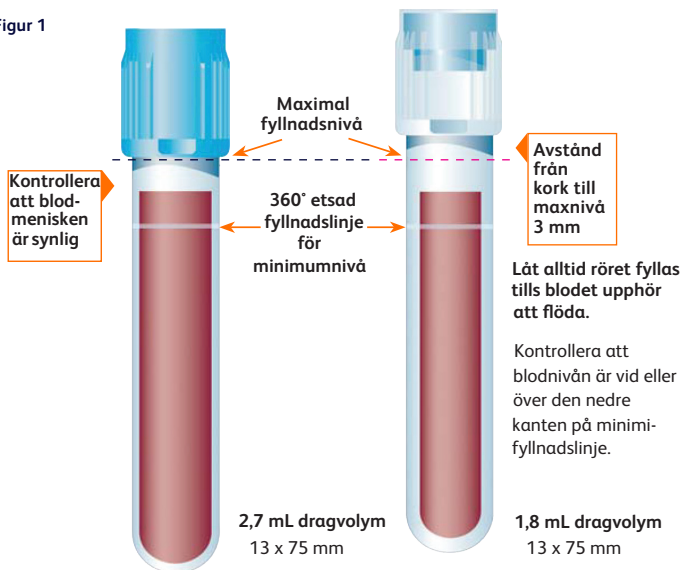

Bilden är endast avsedd som illustration och motsvarar inte den faktiska storleken

Ytterligare rekommendationer för citratrör:

- Följ alltid den rekommenderade rörföljden för provtagning när citratrör används¹.
- När ett venprovtagningsset används för blodprovtagningen och ett citratrör är det första röret som behövs, måste ett slaskrör tas först. Slaskröret används för att avlägsna luft ur slangen i venprovtagningssetet, så att korrekt blodvolym dras in i röret.
- Omedelbart efter provtagning, vänd röret **försiktigt** upp och ner 3–4 gånger. **Skaka inte.**
- BD Vacutainer blodöverföringsenhet ska användas när blod tas med spruta. När en blodöverföringsenhet används får röret inte fyllas över den maximala fyllnadsnivån som visas i illustrationen ovan.

1. CLSI Document GP41, 7th Edition. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens.

Becton Dickinson Sweden AB - Marieviksgatan 25, 117 43 Stockholm, Sweden

Becton Dickinson Finland OY - Äyritie 16, 01510 Vantaa, Finland

Becton Dickinson Norway AS - Gjerdrumsvei 8, 0448 Oslo, Norway

Becton Dickinson Denmark A/S - Lyskær 3E, 2750 Herlev, Denmark



bd.com

