


Pediatrik provtagning från nasofarynx (nf) med Mini-tip

Pediatrik provpinne Mini-tip, ska endast användas för nasofarynxprovtagning på neonatala och mycket små barn. Provpinnen kombineras med TRANSWAB blå.

TRANSWAB blå + Mini-tip, pediatrik provpinne för nasofarynx

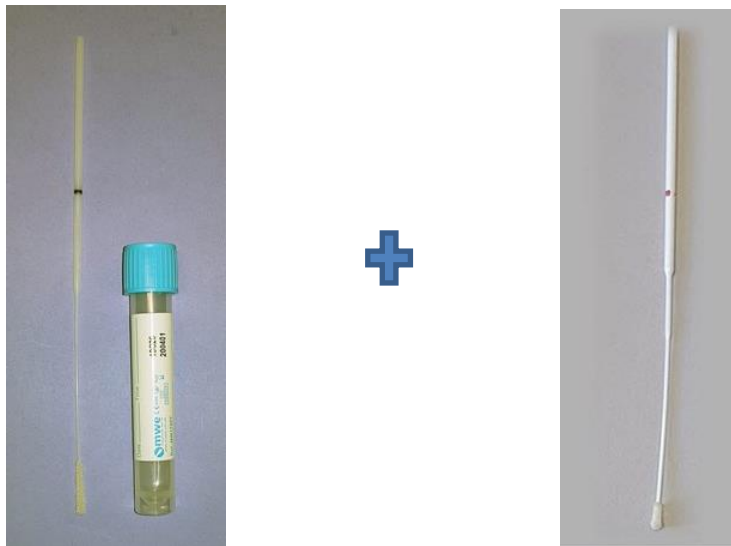

Provtagning:

- Ta prov med Ped provpinne Mini-tip, enligt ordinarie rutin.

Efter provtagning:

- Stoppa pinnen i TRANSWAB-röret.
- Bryt av provpinnen och skruva på korken.
- Provpinnen som medföljer kit används inte, den kan kastas.

Provtagningsanvisningar: www.karolinska.se/lab

För frågor:

Kundservice: 08-123 719 99