

Klinisk mikrobiologi

## Information för Bakteriekodning, ortopediska implantat - beställning och provhantering

### Beställning i TakeCare

Beställ: Bakteriekodning, ortopediskt implantat

### Provtagningsmateriel

Beställ burkarna i Webbutiken, [www.karolinska.se/lab/webbutik](http://www.karolinska.se/lab/webbutik)

Steril burk för  
implantat, liggande

För t.ex. höftprotes



Steril burk för  
implantat, stående

För t.ex. knäprotes



### Provhantering

Placera implantatet i lämplig burk och stäng ordentligt.

Lägg burken i en tät plastpåse, för att undvika läckage.  
Använd inte tape eller liknande direkt på burken.

För mindre implantat, t.ex. skruvar och plattor, använd  
Sterilt provrör eller Sputumburk istället.



### Transport

Vid transporttid längre än 3 timmar, till exempel prov från Danderyds sjukhus till Karolinska  
Huddinge. Fyll på burken med steril 0.9% NaCl precis så vätskan täcker implantatet.

**VIKTIG!** Använd inte mer vätska än nödvändigt för att täcka implantatet!

### Kontakt för frågor

Kundservice

Karolinska Universitetslaboratoriet

Telefon: 08-123 719 99



Max volym vätska