


Märkning av blododlingsflaskor

- Varje flaskpar (aerob + anaerob) ska ha etiketter med samma RID-nummer.
- Placera etiketten lodrätt, så att streckkoden kan läsas av.
- Placera etiketten på flaskan över tom yta. Viktigt att flaskans streckkod är synlig.

Aeroba och anaeroba blodflaskor

Inför provtagningen

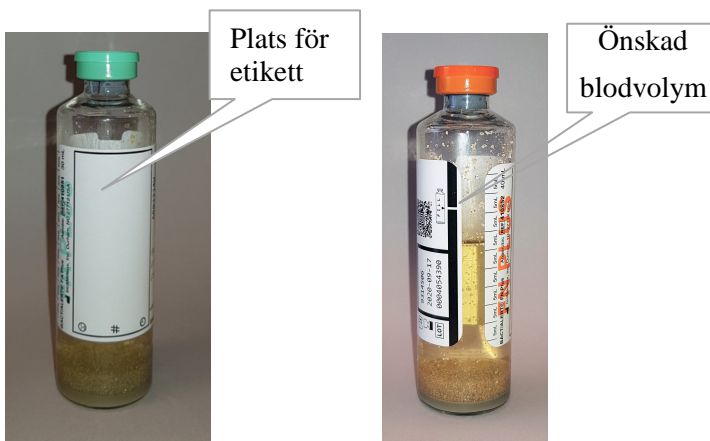

Etikettens
RID-nummer



En aerob + en anaerob blodflaska är ett flaskpar

Ett flaskpar ska märkas med etiketter med samma RID-nummer

Flaskpar 1



Flaskpar 2



Ped flaska



Viktigt att flaskans streckkod är synlig

Flaskpar 2 ska ha en ny beställning och ett nytt RID-nummer

Placera etikett på tom yta
Flaskans streckkod ska vara synlig