


Pappersremiss

Märkning av prover samt hantering av akuta prover och blodsmitta

- Placera etiketten rakt så att streckkoden kan läsas av.
För provtagningsrör placeras den från proppen och rakt ner.
- Grundregeln är ett rör/burk till varje etikett.
- Vid behov av transporthylsa, märk den med liten nummeretikett.
- För prover till Tranfusionsmedicin (blodcentralen) och Patologen/Cytologen måste etikett med personnummer och namn sättas på röret.

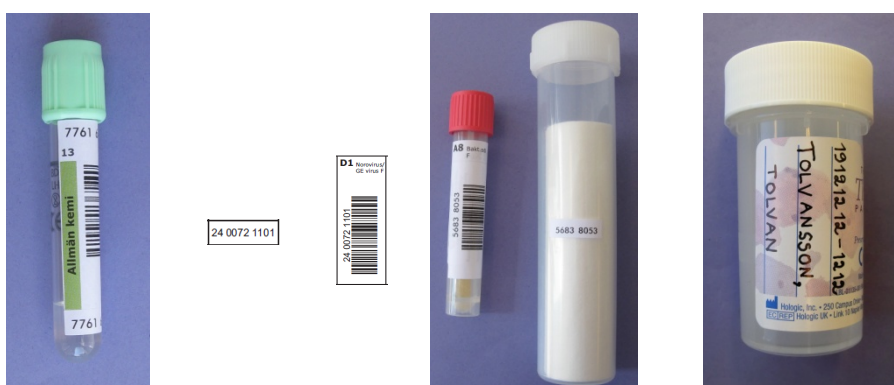

Placera etiketten från proppen och rakt ner. Märk transporthylsan med liten nummeretikett.

ThinPrep burk:
Märk provet med personnummer och namn.

Akutprov

- Beställ akutprover på separat remiss.
- Markera rutan för akutprov på remissen.
- Placera akutetiketten längs med röret, på tom ytan.



Blodsmitta

9 L G S U R Y S n S D W L H Q W P H G N I Q G
 U X W L Q \$ O O W E O R G E H K D Q G O D V V
 E O R G V P L W W D