

## Kontrollblad för Seronorm™ CRP Liquid

### QuikRead go



Seronorm™ CRP Liquid L-1 lot 2210890

Åsatt kontrollgräns: 13–17 mg/L

Utgångsdatum: 2028-01-31



Resultat mindre än eller lika med	Resultat mellan	Resultat större än eller lika med
12	13-17	18



Seronorm™ CRP Liquid L-3 lot 2210894

Åsatt kontrollgräns: 61 – 87 mg/L

Utgångsdatum: 2028-01-31

Resultat mindre än eller lika med	Resultat mellan	Resultat större än eller lika med
60	61-87	88

**Kontrollmaterialet skall förvaras i kyl. Hållbar 1 månad efter öppnande.**

Ny flaska: Ta av skruvkork och propp. Sätt på en ny droppkork.

Utförande:

1. Ta fram kontrollflaskan och blanda försiktigt. Undvik skumbildning!
2. Ta av proppen på droppkorken och applicera en droppe på t ex parafilm.
3. Sug upp rätt mängd i kapillären. Det är viktigt att kapillären är fylld.
4. Analysera kontrollen på samma sätt som ett patientprov
5. Avläs svaret. Kontrollera att det ligger inom angivna gränser.

Om kontrollerna hamnar i de röda områdena, gör om analysen en gång till.

För mer information, se användarinstruktion B-CRP QuikRead go easy, PNA.