

INSTRUKTIONER TILL VÅRDGIVARE

vid

ANALYS

av

KVALSTERALLERGEN I DAMM



Medicinsk Diagnostik Karolinska
Klinisk immunologi Solna
Telefon 08-123 759 30

KVALSTERALLERGEN I DAMM

Analysen kan vara aktuell när man ska **undersöka eventuell förekomst av kvalsterallergen**. Inför allergen immunterapi (ASIT/AIT) mot kvalsterallergi kan man ta reda på om det finns stora mängder kvalsterallergen i bostaden (innan man vidtar omfattande saneringsåtgärder. Kvalster förekommer framför allt i sängen. De trivs i fukt, värme och mörker.

Följ noggrant våra instruktioner:

1. Analysen (Miljöanalys, dammkvalster) och Kollektorn beställs av vårdenhet. Firma "Indoor Biotechnologies" Artikelnummer till Kollektor: DU-ST-1.
2. Beställande vårdenhet ger patienten en kollektor samt instruktioner om hur kollektorn ska användas på patientens privata (egna) dammsugare.
3. Önskade platsen dammsugs enligt kollektorns särskilda instruktioner.
4. Endast filterröret inuti uppsamlaren lämnas in i en väl tillsluten liten påse (se bilden nedan) för analys hos någon Karolinskas Provtagningsenheter där det märks med beställningens labnummer (LID) och skickas därefter till Klinisk immunologi Solna.



OBS! Patienten kan välja "Övrigt" i kösystemet på Provtagningsenheten för att förhindra väntetid vid provets inlämning. Saknas "Övrigt" ska "Provtagning" väljas.