

Provtagningsanvisning för prover med hanteringstid "U2H"

Hanteringstid "U2H" – Allmän information

Denna hanteringsrutin används för prover som ska hanteras och frysas in **inom 2 timmar** efter provtagning. Hanteringstiden styr automatiskt trivialnamn, analyskod och extension. För denna hanteringstid inleds trivialnamnet alltid med **U2H** (till exempel **P-U2H CITRATPLASMA**) och extensionen börjar alltid med **Z** (till exempel **ZC**), vilket resulterar i analyskoden **BBKZC**. En fullständig översikt över provtagningskärl, trivialnamn och analyskoder för prover med hanteringstid U2H finns i Tabell I på nästa sida.

Provtagning

Provtagningen får endast utföras på någon av följande platser:

- Provtagningscentral (PTC) vid Karolinska Universitetssjukhuset (Solna/Huddinge) eller Danderyds sjukhus.
- Avdelning eller mottagning vid Karolinska Universitetssjukhuset (Solna/Huddinge) eller Danderyds sjukhus.

Utförande

- Endast venös provtagning. Kapillär provtagning är **inte** tillåten.
- Rören ska fyllas tills vakuumverkan upphör. Urinrör ska fyllas till minst hälften.
- Vänd samtliga venprovtagningsrör 8–10 gånger omedelbart efter provtagning. Användning av blodvagga rekommenderas.
- Provtagning ska ske enligt rekommenderad rörordning (KUL0348). Om kliniska prover tas samtidigt gäller följande rörordning:
 1. Citratrör, klinisk beställning
 2. Citratrör, PreBio beställning
 3. Övriga rör, klinisk beställning
 4. Övriga rör, PreBio beställning

Transport och provhantering

Prover med extension **Z** ska skickas omgående med rörpost enligt lokal rutin till Preanalytiska Sektionen i Huddinge eller Solna eller till Klinisk kemi 24Sju i Danderyds sjukhus. Proverna ska anlända till det hanterande laboratoriet mellan kl. 08.00 och 16.00 på helgfria vardagar.

 **Viktigt för alla serumrör:** Serumrör ska stå i upprätt position i 30 minuter före transport till laboratoriet för att säkerställa fullständig koagulation. Detta gäller även serumrör med extension **Z**.

Tabellen nedan visar trivialnamn i PreBio-processen för prover med hanteringstid U2H (inom 2 timmar), tillsammans med motsvarande analysnamn, analyskod samt rörtyp och rörstorlek.

Rörtyp och storlek	Trivialnamn i Analytix	Analyskod
Na-citratrör, blå propp, 3,2 mL (dragvolym 2,7 mL)	P-U2H CITRATPLASMA	BBKZC
	P-U2H CITRATPL 2	BBKZC2
	P-U2H CITRATPL 3	BBKZC3
EDTA-rör, lila, 5 mL	B-U2H EDTABLOD	BBKZEB
	B-U2H EDTABLOD 2	BBKZEB2
	B-U2H EDTABLOD 3	BBKZEB3
EDTA-rör, lila, 10 mL	P-U2H EDTAPL 10ML	BBKZE10
	P-U2H EDTAPL 10ML 2	BBKZE102
EDTA-rör, lila, 5 mL	P-U2H EDTAPLASMA	BBKZEP
	P-U2H EDTAPL 2	BBKZEP2
	P-U2H EDTAPL 3	BBKZEP3
Li-heparinrör med gel, ljusgrön, 5 mL	P-U2H LIHEPPL GEL	BBKZLHG
	P-U2H LIHEPPL GEL 2	BBKZLHG2
	P-U2H LIHEPPL GEL 3	BBKZLHG3
	P-U2H LIHEPPL GEL 4	BBKZLHG4
Na-heparinrör, mörkblå, 5 mL	P-U2H NAHEPPLASMA	BBKZNH
	P-U2H NAHEPPL 2	BBKZNH2
	P-U2H NAHEPPL 3	BBKZNH3
Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp, 5 mL	S-U2H SERUM	BBKZS
	S-U2H SERUM 2	BBKZS2
	S-U2H SERUM 3	BBKZS3
Serumrör med koagulationsaktivator, röd propp, 10 mL	S-U2H SERUM 10ML	BBKZS10
	S-U2H SERUM 10ML 2	BBKZS102
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp, 5 mL	S-U2H SERUM GEL	BBKZSG
	S-U2H SERUM GEL 2	BBKZSG2
	S-U2H SERUM GEL 3	BBKZSG3
	S-U2H SERUM GEL 4	BBKZSG4
Sterilt provrör (PP), vitt skruvlock, 10 mL	U-U2H URIN	BBKZU
	U-U2H URIN 2	BBKZU2
	Fo vtn-U2H Fostervatten	BBKZFV
	Csv-U2H Cerebrospinalvätska	BBKZCSV