

## Bruksanvisning MIK2694-9 Campylobacteragarplatta

### BRUKSANVISNING

Namn: Campylobacteragarplatta  
 Märkning på produkt: CUP  
 Artikelnummer: MIK2694-9  
 UDI-DI: 7331831710503  
 Röd agar i transparent petriskål, 9cm

#### Avsedd användning

Produkten är avsedd att användas av utbildad laboratoriepersonal som ett generellt odlingsmedium för bakteriologisk *in vitro*-diagnostik. Campylobacteragar används som del av mikrobiologisk metod för primärodling av fecesprover.

Mikroorganismer med högre och mer specifika näringsbehov kan inte förväntas uppvisa god växt på denna typ av agar. Ytterligare metoder kan vara nödvändiga för fullständig identifikation.

#### Försiktighetsåtgärder

Endast för yrkesmässig användning. Använd inte produkten vid misstänkt kontamination, missfärgning eller uttorkning. Odlad produkt samt kontaminerat material skall hanteras enligt yrkesmässiga riktlinjer samt riktlinjer för smittförande avfall. Odlad produkt kan avdödas genom autoklavering vid 121°C i minst 20 minuter.

#### Förvaring och hållbarhet

Hållbarhet för produkten är fem veckor.  
 Förvara plattorna vid 2–8°C. Förvaring i försluten plastpåse rekommenderas ej.  
 Plattorna kan inokuleras fram till angivet utgångsdatum på förpackningen.

#### Resultat

Se tabell nedan för förväntat resultat av följande stammar vid aerob inkubering vid 42°C i två dygn.

Referensnummer	Stam	Växtresultat	Koloniutseende			
			Storlek	Form	Färg	Konsistens
ATCC 33291	<i>Campylobacter jejuni</i>	Växt		Utflytande	Metalliskt grå	Lite blöt
ATCC 33559	<i>Campylobacter coli</i>	Växt		Utflytande	Metalliskt grå	Lite blöt
ATCC 25922	<i>Escherichia coli</i>	Nollväxt, hämmad				
ATCC 29212	<i>Enterococcus faecalis</i>	Nollväxt, hämmad				
ATCC 29245	<i>Proteus mirabilis</i>	Nollväxt, hämmad				

## **Bruksanvisning MIK2694-9 Campylobacteragarplatta**

---

### **Ytterligare information**

Karolinska Universitetssjukhuset  
Klinisk mikrobiologi  
Substratenheten F78  
141 86 Stockholm

Telefon: 08-123 879 16  
E-post: [substrat.karolinska@regionstockholm.se](mailto:substrat.karolinska@regionstockholm.se)