

Urinprovtagning, vilket rör ska användas?

Bakterieodling urin (Urinodling), prover som skickas med transportbil till Klinisk mikrobiologi

Om transportbil hämtar prover minst 2 gånger per vecka från er enhet, ska urinprover för Bakterieodling hanteras och skickas i Sterilt provrör PP enligt ordinarie rutin.

Sterilt provrör PP, vit skruvkork

- Beställs i webbutiken Artikel nr 4302
- Förvara provet i kyl i väntan på transport.
- Skicka provet med nästa möjliga transport i låda med kylklamp



Sterilt provrör

Används för urinodling vid ordinarie rutin, med transportbil.

Bakterieodling urin (Urinodling) som skickas med post till Klinisk mikrobiologi

Borsyrerör används för kunder som inte har hämtning av prover med transportbil, i stället skickar prover med post till Karolinska Universitetslaboratoriet

Borsyrerör + Adapter, gulgrön propp

- Beställs i webbutiken Artikel nr 4312.
- Ska endast användas för urinodling som skickas med post.



Borsyrerör:

Ska endast användas för urinprov som skickas med post.

Stickprov urin och urinsamlingar till Klinisk kemi

Från och med den 22 november 2023 ska ett 4 mL vakuurrör för urinanalyser användas för vissa urinprover till Klinisk kemi Karolinska Universitetslaboratoriet.

Se provtagningsanvisningar för mer information.

Vacuurrör urin 4 mL

- Beställs från MediCarrier, Artikel nr 99753
- Röret kan kombineras med Hållare med överföringsstrå, för överföring av urin till vakuurrör, Artikel nr 99748 och 87752.
- Gäller för prov som tas som stickprov och urinsamling.
- För Urinsamling används röret vid avhällning från dunk till nytt rör.



Vacuurrör urin 4 mL:

Används för prover till Klinisk kemi, stickprov och urinsamlingar

Läs mer om urinprovtagning i provtagningsanvisningarna på www.karolinska.se/lab

Kontakt för frågor:

Kundservice, Karolinska Universitetslaboratoriet
Telefon: 08-123 719 99