

Datum:
2023-07-27

Provtagning med Greiner Bio-One för droganalyser i saliv.

1. Greiner Bio-One kit består av tre olika delar: ett rör med blå kork och gul vätska, en bägare med överföringsanordning och ett eller två tomma rör med orange kork. (Använd ett rör med orange kork för sjukvårdsprover och två rör för företagsprover).
2. Kontrollera provlämnarens identitet och håll personen under uppsikt tills hela provtagningsprocessen är klar.
3. Låt provlämnaren skölja munnen med vatten och var observant på att personen inte har något i munnen. Provlämnaren ska också noggrant tvätta sina händer.
4. Vänta 10 minuter innan fortsatt provtagning.
5. Fyll under tiden noggrant i remissen med blått eller svart bläck. Alternativt fyll i alla uppgifter i den elektroniska beställningen.
6. Vid all hantering av provrör och burk ska handskar användas. För sjukvårdsprov märk provröret med orange kork med samma ridnummer som på remissen
7. Be provlämnaren inta den gula vätskan från röret med blå/lila kork och hålla vätskan stilla i munhålan i 2 minuter och sedan spotta ut i bägaren.
8. Förslut bägaren med orange lock. Säkerställ att locket är åtdraget.
9. På locket finns en tejpremsa som försluter en fördjupning i locket. Ta bort tejp.
10. Överför därefter provet i bägaren till överföringsröret/-en med orange kork via överföringsanordningen på bägaren genom att sakta trycka in röret i fördjupningen i bägarens lock. För drogtest i arbetslivet fylls två rör med orange propp från samma bägare.
11. För drogtest i arbetslivet förseglas de två rören med provetiketter från remissen för drogtest i arbetslivet i den provtagnes närvaro.
12. Materiel och remiss beställs från <https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet/Webbutik-bestall-provmateriel-mm/>

OBS! Företaget Greiner Bio-One har meddelat att de avslutat sin produktion av provtagningsmaterial men så länge provtagningsmaterial finns kvar hos oss kan vi leverera och analysera era prover. Därefter rekommenderar vi Quantisal salivprovtagningskit. Se då separat provtagningsinstruktion.

Information: En del personer har kraftig slemproduktion i munhålan som kan resultera i alltför slemmiga prover vilket kan försvåra överföringen av vätskan i muggen till provrören med orange kork. I dessa fall förekommer det även att analysen avvisas på laboratoriet då provet inte kan pipetteras på ett korrekt sätt. Be därför alla som provtas att enbart hålla lösningen stilla i munnen. Lösningen med gul färg är svagt sur och salivproduktionen stimuleras naturligt utan att lösningen sköljs runt i hela munnen.