

COVID-19 Antigen-test, Abbott Panbio

I förpackningen ingår följande

- Provpinne
- Testkassett
- Provrör med vit kork
- Blå kork
- Reagensflaska
- Kontrollpinnar
- Provställ
- Snabbguide
- Utförlig manual (flerspråkig)



Analys av kontroller




Vid öppnande av ny förpackning ska analys av kontroller utföras för att säkerställa kvaliteten på förpackningen. Anteckna förpackningens lotnummer på kontroll- och arbetslistan.

I varje förpackning ingår 2 stycken kontrollpinnar, en positiv (röd pinne) och en negativ kontroll (grön pinne).


Använd kontrollpinne istället för provtagningspinne och utför analysen,
se beskrivning nedan.

Använd en kassett för varje pinne. Märk kassetterna med + respektive -.

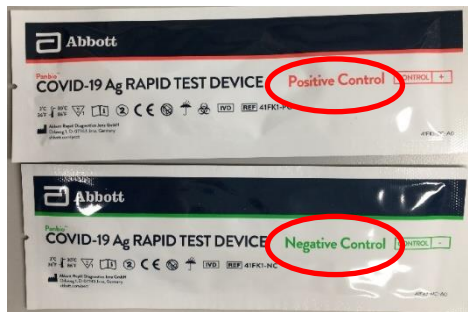


Resultatet av kontrollerna dokumenteras på kontroll- och arbetslistan. Om den positiva kontrollpinnen inte blir positiv eller om den negativa kontrollpinnen inte blir negativ **ska förpackningen inte användas.**


Analys av kontroller

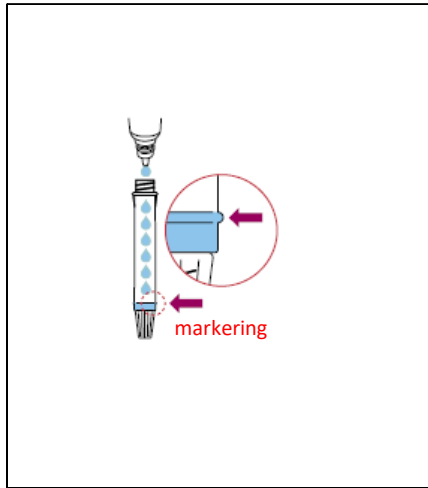

1 Droppa reagenslösning i provröret till markeringen, ca 10 droppar. Ställ sedan provröret i provrörsstället.

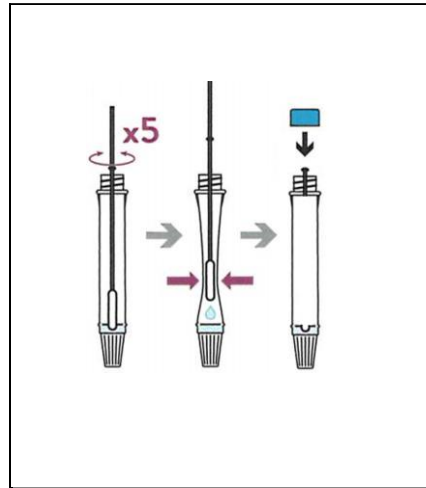


2 Snurra kontrollpinnen 5 varv i röret. Tryck pinnen mot väggen. Kläm ihop och krama ur pinnen. **Släng pinnen** och skruva på den blå korken ordentligt.

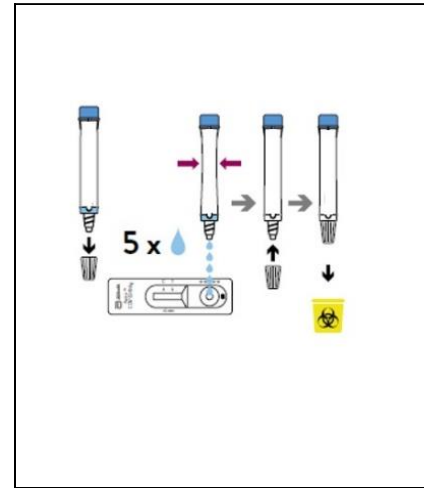

3 Håll provröret över provbrunnen. Skruva av den vita korken.

Droppa 5 droppar i provbrunnen på testkassetten. Skruva på vit kork.

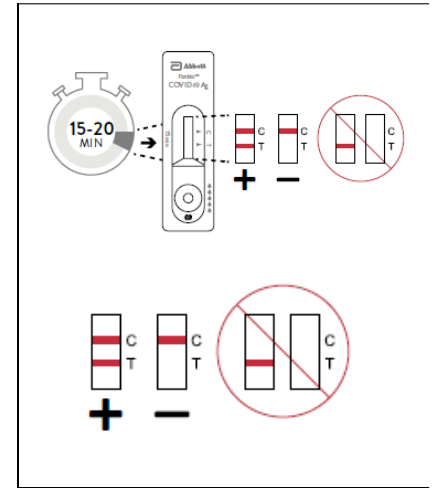

4 Vänta i 15 minuter innan avläsning, avläs inte efter 20 minuter.

Tolkning av resultat:
C kontrollinje ska alltid synas.

Dokumentera resultatet på kontroll- och arbetslistan

Förberedelser patientprov



1 Ta fram allt som behövs för en patient: en provpinne, ett provrör, en kork, reagensflaskan samt en testkassett.

KAROLINSKA UNIVERSITETSLABORATORIET Kontroll- och arbetslista COVID-19 Antigen-test Datum:

Tag en ny blankett för varje ny förpackning.
Ifyllt blankett sparas enligt lokal rutin efter att resultat rapporterats till ansvarig läkare.


Leverantör: Abbott Lotnummer:
Se förpackning

Fyll i patientens personnummer eller ID. Märk kassetten och röret med motsvarande kassett/rörnummer enligt tabellen.
Utför provtagning och analys.
Rapportera provsvar till ansvarig läkare.

Personnummer/patient ID	Kassett- och rörnummer	Resultat		Signatur
		Positivt	Negativt	
Positiv kontroll	+			
Negativ kontroll	-			
	1			

2 Anteckna patientens personnummer eller ID/kod på kontroll- och arbetslistan samt kontrollera lotnummer på förpackningen.

Tag en ny lista för varje förpackning.

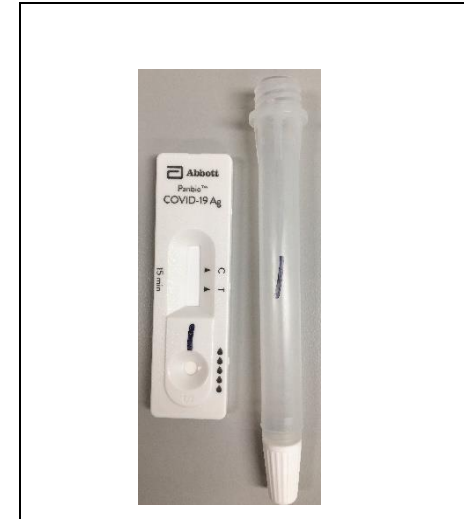


3 Märk rör och kassett med motsvarande nummer, med vattenfast tuschpenna


COVID-19 Antigen-test, Abbott Panbio




1 Ta fram en provpinne, ett provrör, en kork, reagensflaskan samt en testkassett per patient.

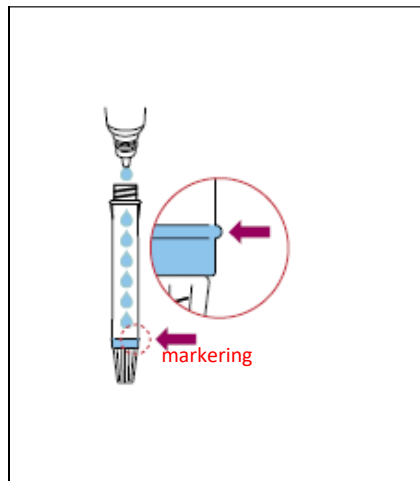

2 Droppa reagensvätska till markeringen, ca 10 droppar. Ställ sedan provröret i provrörstället

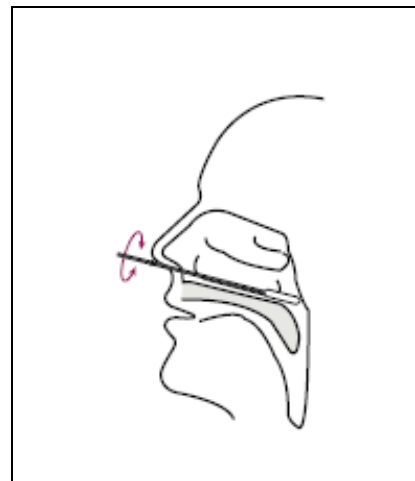


3 Provtä patienten. Se provtagningsanvisning nedan. Nasopharynx-provtäning rekommenderas.

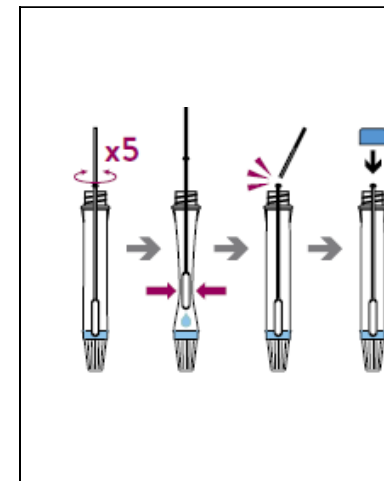


4 Snurra provpinnen 5 varv i röret, tryck provpinnen mot väggen. Kläm ihop och krama ur provpinnen. Bryt av provpinnen. Skruva på den blå korken ordentligt.

COVID-19 Antigen-test, Abbott Panbio

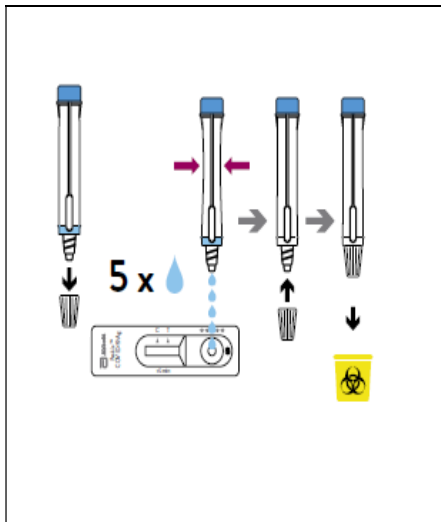


5 Skruva av den vita korken när provet ska droppas.

Droppa 5 droppar i provbrunnen på testkassetten.

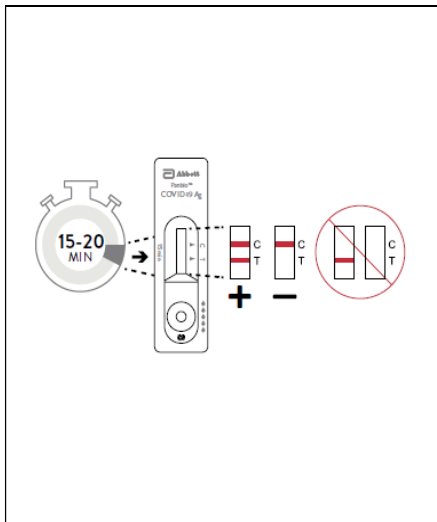


6 Vänta i 15 minuter innan avläsning, avläs inte efter 20 minuter.

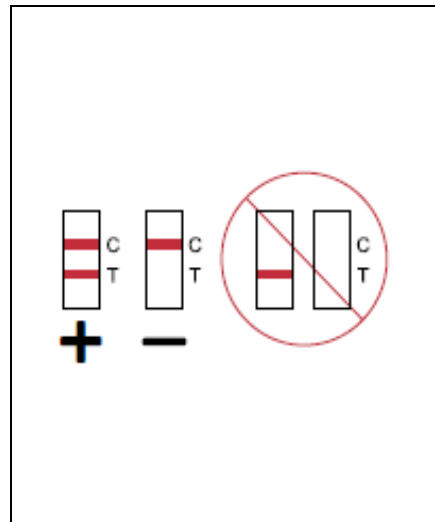


7 Tolkning av resultat: C kontrollinje ska alltid synas. Ta om provet om C kontrollinjen inte syns.

Dokumentera resultatet i TakeCare eller på arbetslista.


Provtagning Nasopharynx

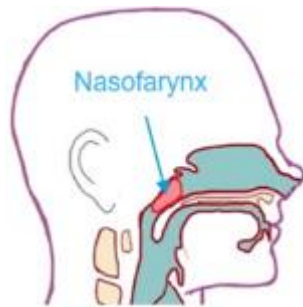

Lyft patientens
nästipp, för att
vidga
näsöppningen.

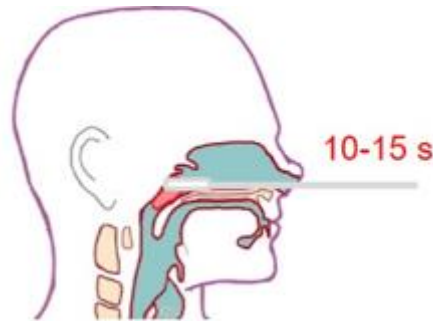

För in pinnen längs
näsbotten tills
spetsen når bakre
nasopharynx.

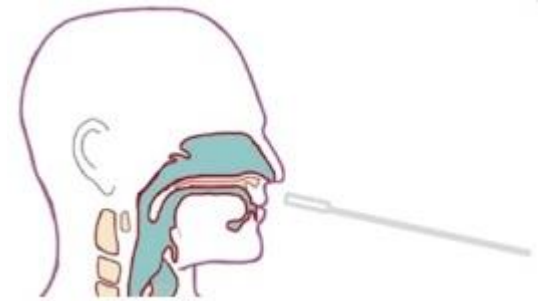

Låt ligga kvar 10-15
sekunder.
Vrid pinnen innan den
dras ut.

Om du känner motstånd när du för in pinnen, ta ut pinnen och försök igen i samma eller motsatt näsöppning.

COVID-19 Antigen-test, Abbott Panbio

Svarsrutiner

Negativt resultat

Inget COVID-19 antigen påvisas

Provsvar dokumenteras i
TakeCare mätvärden: "*Snabbtest
Coronavirus SARS-CoV-2-Ag*"

Eller dokumentation enligt lokala
rutiner

Positivt resultat

COVID-19 antigen påvisas

Provsvar dokumenteras i
TakeCare mätvärden: "*Snabbtest
Coronavirus SARS-CoV-2-Ag*"

Eller dokumentation enligt lokala
rutiner. Meddela ansvarig läkare
resultatet

Se Vårdgivarguiden för
handläggning

[Covid-19 - samlad information](#) |
[Vårdgivarguiden \(vardgivarguiden.se\)](#)