

Kontrollblad för Seronorm™ CRP Liquid

Afinion AS100 och Afinion 2



2210890

Seronorm™ CRP Liquid L-1 lot 2210890

Åsatt kontrollgräns: 12-17 mg/L

Utgångsdatum: 2028-01-31



Resultat mindre än eller lika med	Resultat mellan	Resultat större än eller lika med
11	12-17	18



2210894

Seronorm™ CRP Liquid L-3 lot 2210894

Åsatt kontrollgräns: 65 – 91 mg/L

Utgångsdatum: 2028-01-31

Resultat mindre än eller lika med	Resultat mellan	Resultat större än eller lika med
64	65-91	92

Kontrollmaterialet skall förvaras i kyl. Hållbar 1 månad efter öppnande.

Ny flaska: Ta av skruvkork och propp. Sätt på en ny droppkork.

Utförande:

1. Ta fram kontrollflaskan och blanda försiktigt. Undvik skumbildning!
2. Ta av proppen på droppkorken och applicera en droppe på t ex parafilm.
3. Sug upp rätt mängd i kapillären. Det är viktigt att kapillären är fylld.
4. Sätt kapillären i provkassetten och analysera inom 1 minut.
5. Avläs svaret. Kontrollera att det ligger inom angivna gränser.

Om kontrollerna hamnar i de röda områdena, gör om analysen en gång till.

För mer information, se användarinstruktion B-CRP Afinion, PNA.