

Urinprovtagning av drogtest för arbetslivet



Före provtagningen

- Be provlämnaren ställa bort väska och dylikt, avlägsna skrymmande klädesplagg.
- Be provlämnaren noga tvätta, skölja samt torka sina händer.
- Provlämnaren får inta högst ett glas vätska i väntan på att provet skall lämnas.

Provtagningsutrymmet

- Toalett bör ha färgat vatten (t ex blåfärgat).
- Vattnet till handfatet bör vara avstängt.
- Möjlighet till handtvätt får finnas utanför.



Provtagning

- Använd handskar vid hantering av provet.
- Förse provlämnaren med provtagningskärlet.
- Var observant på tecken till manipulation, be om nytt prov vid misstanke.

Efter provtagningen

Samtliga av nedanstående moment utförs i närvaro av provlämnaren:

- Temperaturen skall avläsas inom 4 minuter.
- Acceptera endast provet om det är kroppsvarmt, 32-38°C.



- Ange på remissen att temperaturkontrollen är utförd.
- Granska urinprovet avseende färg, lukt, konsistens, kristaller på botten.
- Häll upp urinen i tre rör med gul kork, vilka är rekviderade från webbutiken ([länk](https://karolinska.se/lab)) på karolinska.se/lab, och förslut dessa med ridnummeretikett. Fyll röret med minst 5mL urin till max 1cm från övre kanten.
- Fyll i resterande remissuppgifter med bl. a. provlämnarens underskrift och samtycke.

Remissuppgifter

- Kontrollera provlämnarens identitet och ange personuppgifter på remissen.
- Fyll i alla uppgifter noggrant med blått eller svart bläck, viktigt för rätt bedömning av provresultatet.
- Var noga med att notera ev. intagna läkemedel den senaste veckan.



Positiva svar till MRO

Uppge fullständig adress, om adressen inte överensstämmer med svarsmottagaren.

K A1 990027-03998 1 urin 21 0270 3998 NU

K A2 990027-03998 1 urin 21 0270 3998 NU

K B 990027-03998 1 urin 21 0270 3998 NU

K 990027-03998 1 saliv 21 0270 3998 NU

990027-03998 1 Viks omlott under

Provlämnaren Personnummer (år, mån, dag, nr) Efternamn och förnamn Telefonnummer dagtid		Provlämnarens samtycke Jag intygar att provet som lämnats av mig försäglats i min ägen. Nedan markerade analyser får utföras av Karolinska Universitetslaboratoriet på mitt prov. Om ansvarig läkare eller MRO bedömer provet som positivt får resultatet överlämnas till ansvarig chef i enlighet med gällande drogpolicy. Datum _____ Underskrift _____	
Svarsmottagare (adress och kombikod)		ID-kontroll <input type="checkbox"/> DROGTEST FÖR ARBETSLIVET Används även för skolhälsovård, körkortsutredning mm.	
Provtagningstid år: 2 0 - månad - dag klockslag		Prov-kod 990027-03998 1	
Fakturmottagare (kombikod) om annan än svarsmottagaren		Anledning till provtagning <input type="checkbox"/> Slumpmässig <input type="checkbox"/> Nyanställning <input type="checkbox"/> Hälsokontroll <input type="checkbox"/> Rehabilitering <input type="checkbox"/> Tillbud/olycka <input type="checkbox"/> Misstanke <input type="checkbox"/> Annan	
MRO/Ansvarig läkare		<input type="checkbox"/> Endast positiva svar till MRO	
Urin (Märk provrören med gula sigill) <input type="checkbox"/> Cannabis <input type="checkbox"/> Kokain <input type="checkbox"/> Amfetamin/Ecstasy <input type="checkbox"/> Bensodiazepiner <input type="checkbox"/> Heroin/Morfin <input type="checkbox"/> Anabola steroider		Urintemp	
Saliv (Märk provrören med röda sigill) <input type="checkbox"/> Cannabis <input type="checkbox"/> Metamfetamin <input type="checkbox"/> Kokain <input type="checkbox"/> Amfetamin <input type="checkbox"/> Heroin/Morfin <input type="checkbox"/> Bensodiazepiner			
Utandningsluft (Märk provsamlaren och plombera cellofanpåsen med blå etiketter) <input type="checkbox"/> Drogtest			
Läkemedel/Meddlanden		Rid 21 0270 3998	
6975420441		Provtagare Provtagningen har följt företagets instruktion för drogtestprovtagning och provlämnaren har lämnat skriftligt samtycke. Namn _____	

KAROLINSKA Universitetslaboratoriet
Klinisk farmakologi Tel 08-517 719 99 www.karolinska.se/lab

CAP-certifiering
College of American Pathologists

2022-12-20

- Vik den vita delen av remissen och lägg i det andra facket i provpåsen.
- Behåll rosa delen.
- Lämna den gula delen till provlämnaren.
- Det går bra att packa fler provpåsar + remisser i den föradresserade och förfrankerade skickpåsen.
- Förslut noggrant.
- Prover som inte skickas samma dag förvaras i kylskåp i max en vecka.

