

## Bruksanvisning MIK6276 Homogeniseringsrör med BHI

### BRUKSANVISNING

Namn: Homogeniseringsrör med BHI  
Märkning på produkt: Homogeniseringsrör  
Artikelnummer: MIK6276  
UDI-DI: 7331831710657  
Klar, halmgul buljong i plaströr med metallkolor, 5mL

#### Avsedd användning

Produkten är avsedd att användas av utbildad laboratoriepersonal som ett generellt odlingsmedium för bakteriologisk *in vitro*-diagnostik. Homogeniseringsrör med BHI (Brain Heart Infusion-buljong) används som del av mikrobiologisk metod för påvisning av mikroorganismer i homogeniserade vävnadsprover.

#### Försiktighetsåtgärder

Endast för yrkesmässig användning. Använd inte produkten vid misstänkt kontamination, missfärgning eller uttorkning. Odlad produkt samt kontaminerat material skall hanteras enligt yrkesmässiga riktlinjer samt riktlinjer för smittförande avfall. Odlad produkt kan avdödas genom autoklavering vid 121°C i minst 20 minuter.

#### Förvaring och hållbarhet

Hållbarhet för produkten är sex månader.  
Förvara rören vid rumstemperatur.  
Rören kan inokuleras fram till angivet utgångsdatum på förpackningen.

#### Resultat

Se tabell nedan för förväntat resultat av *Cutibacterium acnes* ATCC 11828 samt ett oympat rör där stammen tillsätts till ett homogeniseringsrör som inkuberas i rumstemperatur över natt. Odling görs från homogeniseringsröret före och efter inkubering och antalet kolonier räknas. Ett oympat rör inkuberas i 35°C över natt.

Referensnummer	Stam	Växtresultat
ATCC 11828	<i>Cutibacterium acnes</i>	Växt för inkubering = Växt efter inkubering
(Sterilkontroll) Oympat rör		Ingen växt

## Bruksanvisning MIK6276 Homogeniseringsrör med BHI

---

### Ytterligare information

Karolinska Universitetssjukhuset  
Klinisk mikrobiologi  
Substratenheten  
141 86 Stockholm

Telefon: 08-123 879 16

E-post: [substrathuddinge.karolinska@regionstockholm.se](mailto:substrathuddinge.karolinska@regionstockholm.se)