


Bruksanvisning

BIOTREX

Avfallsbehållare för kliniskt avfall

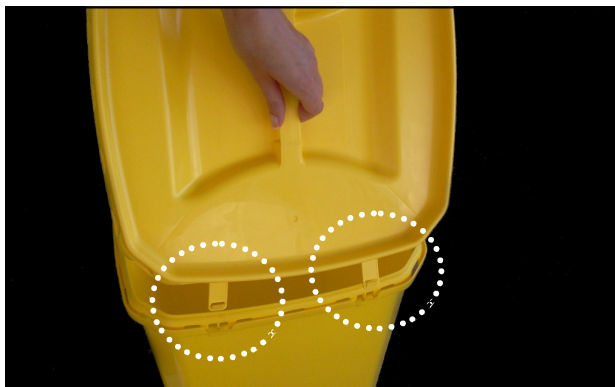

Sätt i locket två gångjärnsfästen i behållarens två hållare. Tryck till lite lätt tills de hakar fast i behållaren. Låt sedan locket falla ned över behållaren. Locket kan nu öppnas och stängas efter behov.



När slutlig stängning skall ske låter man locket fall ned över behållaren. Följ sedan anvisningarna nedan.



Tryck till locket på långsidorna som det visas på bilden. Vänd sedan behållaren och tryck till locket på de två återstående långsidorna.



Forsätt sedan med att göra likadant i de fyra hörnen (se bild). Behållaren är nu transportsäkrad.



Vid förflyttning eller packning av behållaren finns två rejäla handtag i behållaren. Använd dessa för en mer ergonomisk hantering.



Handtaget i locket får endast användas vid förflyttning av transportsäkrade behållare.

