

PAXgene (Blod RNA) för PreBio

- Provtagningen sker måndag-fredag ordinarie öppettider på PTC i Solna, Huddinge, Danderyd och Södersjukhuset.
- PAXgene rör får skickas med rörpost.
- Röret ska ha ankommit till Preanalytiska enheten LNP8/Klinisk Kemi 24Sju senast kl. 16:00.
- Prover ska **ej provtas dag före röd dag**.

Provtagningsanvisning

1. Använd alltid **venprovtagningsset (butterflynål)** och håll alltid röret upprätt/ stående vid provtagning för att undvika baksug (se bild 1). *Röret innehåller skadliga ämnen.*
2. Om provtagning sker i samband med kliniska prover tas PAXgene **alltid sist i rörordningen**. Om PAXgene tas som enskilt prov, använd alltid slaskrör (valfritt rör förutom PAXgene).
3. PAXgene röret ska fyllas tills vakuumverkan upphör.
4. Blanda röret försiktigt 8–10 gånger för hand (OBS! använd ej provtagningsvagg).
5. Förvaras i rumstemperatur innan transport till Preanalytiska enheten LNP8/Klinisk Kemi 24Sju.

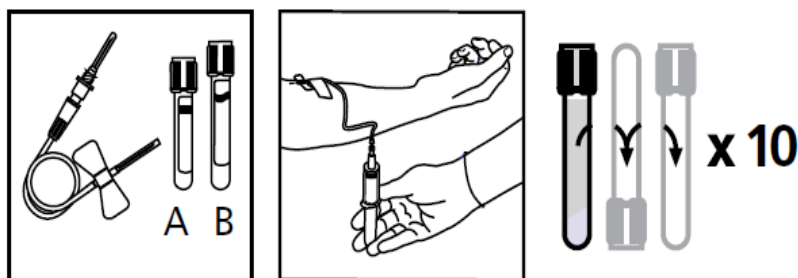


Bild 1.