

Provtagningsanvisning med hanteringstid ”U10H”

Allmänt om hanteringstid ”U10H”

Proverna hanteras omgående vid ankomst till laboratoriet (vid ankomst innan kl. 16:00) och hanteringstiden används vid krav på infrysning inom 10 timmar från provtagning.

Provtagning sker på provtagningscentral, avdelning eller mottagning på Karolinska Universitetssjukhusen i Solna och Huddinge, Södersjukhuset samt Danderyds Sjukhus.

Provtagning

Proverna får ej tas kapillärt.

Rören måste fyllas tills vakuumverkan upphör, urinrör fylls minst till hälften.

Vänd alla rör 8 – 10 gånger direkt vid provtagningen, blodvagga rekommenderas.

Provtagning sker enligt rekommenderad rörordning för Biobanksprover, se anvisning ”Rekommenderad rörordning Biobank och rörmärkning”.

Provhantering

Proverna skickas omgående till laboratoriet förutom serumrör som skall stå 30 min innan transport till laboratoriet för att undvika hemolys.

Provtagningskärl	Analysnamn i Take Care	Analyskod
Citratrör glas (drar 4,5 ml), blå propp 5 ml	U10H CITRATPLASMA - P	BBKYC
	U10H CITRATPL 2 - P	BBKYC2
	U10H CITRATPL 3 - P	BBKYC3
EDTA-rör, lila propp 5 ml	U10H EDTABLOD - B	BBKYEB
	U10H EDTABLOD 2 - B	BBKYEB2
	U10H EDTABLOD 3 - B	BBKYEB3
EDTA-rör, lila propp 10 ml	U10H EDTAPL 10ML - P	BBKYE10
	U10H EDTAPL 10ML 2 - P	BBKYE102
EDTA-rör, lila propp 5 ml	U10H EDTAPLASMA - P	BBKYEP
	U10H EDTAPL 2 - P	BBKYEP2
	U10H EDTAPL 3 - P	BBKYEP3
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp 5 ml	U10H LIHEPPL GEL - P	BBKYLHG
	U10H LIHEPPL GEL 2 - P	BBKYLHG2
	U10H LIHEPPL GEL 3 - P	BBKYLHG3
	U10H LIHEPPL GEL 4 - P	BBKYLHG4
Na-heparinrör, mörkblå propp 5 ml	U10H NAHEPPLASMA - P	BBKYNH
	U10H NAHEPPL 2 - P	BBKYNH2
	U10H NAHEPPL 3 - P	BBKYNH3
Rör utan tillsats, röd propp 5 ml	U10H SERUM - S	BBKYS
	U10H SERUM 2 - S	BBKYS2
	U10H SERUM 3 - S	BBKYS3
Rör utan tillsats, röd propp 10 ml	U10H SERUM 10ML - S	BBKYS10
	U10H SERUM 10ML 2 - S	BBKYS102
Gelrör, gul propp 5 ml	U10H SERUM GEL - S	BBKYSG
	U10H SERUM GEL 2 - S	BBKYSG2
	U10H SERUM GEL 3 - S	BBKYSG3
	U10H SERUM GEL 4 - S	BBKYSG4
Sterilt provrör m rundad botten (skruvkork) 10 ml	U10H URIN - U	BBKYU
	U10H URIN 2 - U	BBKYU2