


## Provtagning med Quantisals drogtest för saliv

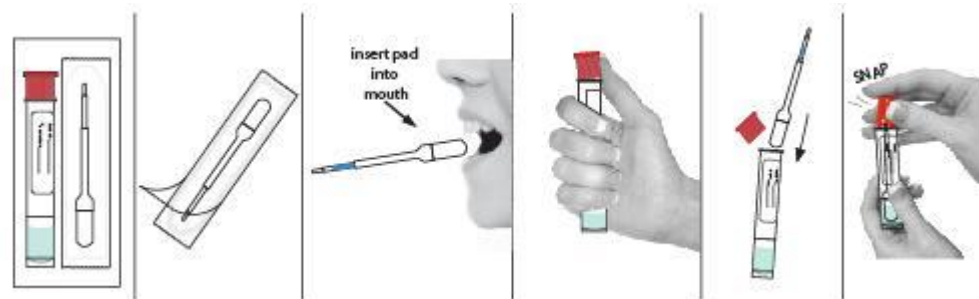

1. Säkerställ att provlämnaren inte haft något i munhålan 10 min innan provtagningen påbörjas
2. Provtagningskit ska beställas från Webbutiken  
<https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet/Webbutik-bestall-provmateriel-mm/>
3. Öppna förpackningen och tag ut spateln
4. Placera spateln i munhålan under tungan
5. Bit försiktigt på plastdelen och vät filtret
6. Samla saliv tills indikatorn visar blått (ca 1-10 min)
7. Öppna provröret med blågrön lösning och stoppa ner spateln
8. Stäng locket
9. Fyll i remissen med blått eller svart bläck och märk den med streckodsetikett med tio siffror
10. Märk provröret med streckodsetikett med samma tio siffror
11. För "drogtest i arbetslivet" krävs två kit