
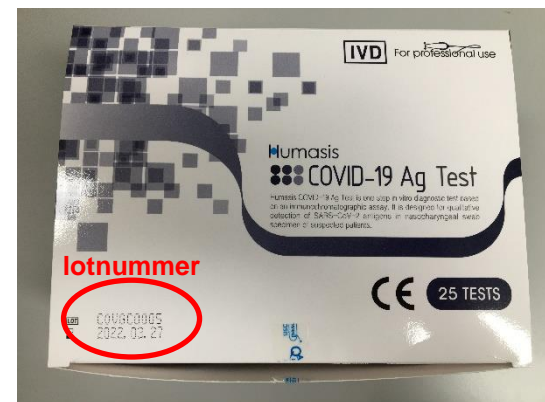


COVID-19 Antigen-test, Humasis

Detta ingår i förpackningen

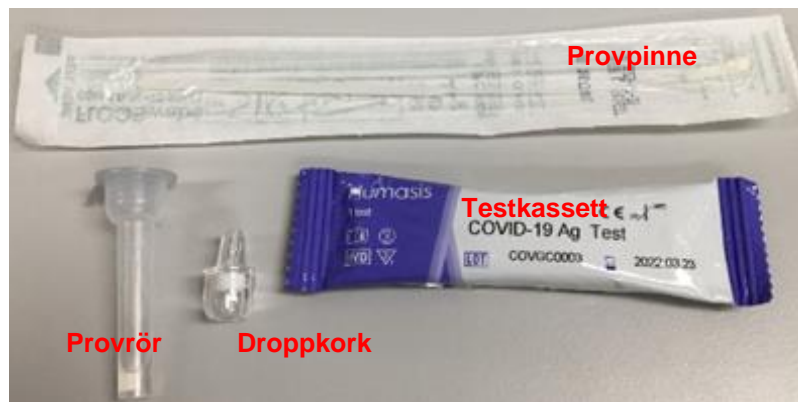

Avsiktlig tom sida

COVID-19 Antigen-test, Humasis

Förberedelser

1

Plocka fram allt som behövs för provtagning och analys



2

Märk rör och kassett med ett unikt ID, med vattenfast tuschpenna



COVID-19 Antigen-test, Humasis

Svarsrutiner

Negativt resultat

Inget COVID-19 antigen påvisas

Provsvar dokumenteras i
TakeCare mätvärden: "Snabbtest
Coronavirus SARS-CoV-2-Ag"

Positivt resultat

COVID-19 antigen påvisas

Provsvar dokumenteras i
TakeCare mätvärden: "Snabbtest
Coronavirus SARS-CoV-2-Ag"

Se Vårdgivarguiden för vidare
handläggning av nyupptäckta fall
av COVID-19
([Provtagning för covid-19 - samlad
information | Vårdgivarguiden](#)
(vardgivarguiden.se))

Lämna relevant
smittskyddsblad, som finns på
Vårdgivarguiden


COVID-19 Antigen-test, Humasis

1

Ta fram

- Provpinne
- Provrör
- Droppkork
- Testkassetten

2

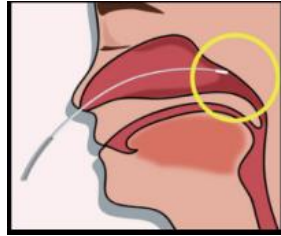

Provta patienten
Se provtagnings-
anvisning på andra
sidan.

3



Tag bort förseglingen på
provröret, och snurra
provpinnen i vätskan i
röret minst tio gånger

4



Kläm ihop och krama ur provpinnen
Sätt på en droppkork

5



Droppa 3 droppar i
provbrunnen på testkassetten


6

15 minuter




Vänta i 15 minuter innan avläsning
Avläs inte efter 15 minuter

7

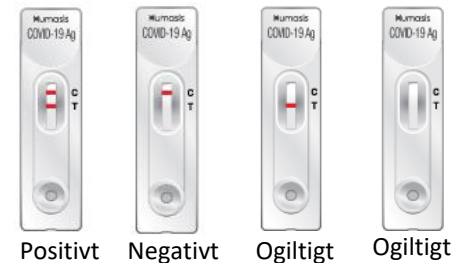


Tolkning av resultat:
C- kontrollinje ska alltid synas
Ta om provet om C kontrollinje inte syns
Dokumentera resultatet i TakeCare


Provtagning Nasopharynx

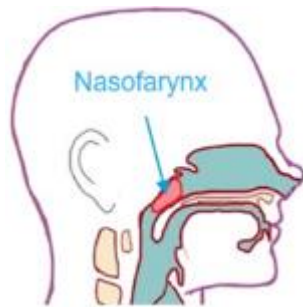

Lyft patientens
nästipp, för att
vidga
näsöppningen.

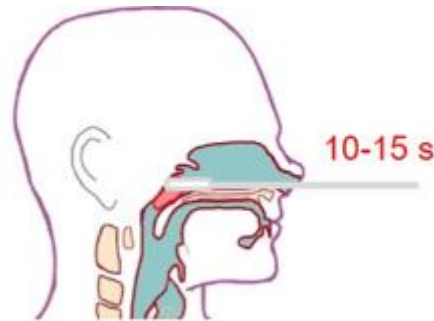

För in pinnen längs
näsboten tills
spetsen når bakre
nasopharynx.

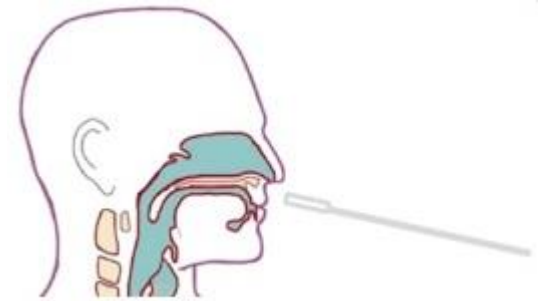

Låt ligga kvar 10-15
sekunder.
Vrid pinnen innan den
dras ut.

Om du känner motstånd när du för in pinnen, ta ut pinnen och försök igen i samma eller motsatt näsöppning.