

Urinprovtagning av drogtest för arbetslivet



Före provtagningen

Be provlämnaren ställa bort väska och dylikt, avlägsna skrymmande klädesplagg.

Be provlämnaren noga tvätta, skölja samt torka sina händer. Provlämnaren får inta högst ett glas vätska i väntan på att provet skall lämnas.

Provtagningsutrymmet

Toalett bör ha färgat vatten (t ex blåfärgat).
Vattnet till handfatet bör vara avstängt.
Möjlighet till handtvätt får finnas utanför.



Provtagning

Använd handskar vid hantering av provet.

Förse provlämnaren med provtagningskärlet.

Var observant på tecken till manipulation, be om nytt prov vid misstanke.

Efter provtagningen

Samtliga nedanstående moment utförs i närvaro av provlämnaren:

- Temperaturen skall avläsas inom 4 minuter.
- Acceptera endast provet om det är kroppsvarmt, 32-38°C.



- Ange på remissen att temperaturkontrollen är utförd.
- Granska urinprovet avseende färg, lukt, konsistens, kristaller på botten.
- Häll upp urinen i tre rör med gul kork, vilka är rekviderade från webbutiken ([länk](https://karolinska.se/lab)) på karolinska.se/lab, och förslut dessa med ridnummeretikett. Fyll röret med minst 5mL urin till max 1cm från övre kanten.
- Fyll i resterande remissuppgifter med bl. a. provlämnarens underskrift och samtycke

A1	990022-00499 8	urin	urin		21 0220 0499 NU
A2	990022-00499 8	urin	urin		21 0220 0499 NU
B	990022-00499 8	urin	urin		21 0220 0499 NU
K	990022-00499 8	sally	sally		

Provlämnaren (Namn, adress, stp, nr)
 ID-nummer och lösenord
 Telefonnummer bjud

Provlämnarens samtycke
 Jag godkänner att provet ska bli riktigt som givet sig. Härmed meddelas att jag har läst och förstått villkoren för provet. Detta godkännande gäller endast för detta prov. Om jag inte godkänner villkoren för provet ska jag inte delta i provet med påstått godkänt resultat.

Svarsmottagare (adress och kontaktkod)

ID-kontroll
 Använda även för skolköksavvärd, körkortutredning mm.

Provtagningsstid
 2 0 - månad - dag
 Klacklag

Prov-kod
 990022-00499 8

Fakturenmottagare (kontaktkod) om annan än svarsmottagare

MRO/Ansvarig läkare
 Endast positiv svar till MRO

Anledning till provtagnin
 Stämningssjuk
 Nya stämning
 Hälsokontroll
 Kontrollstämning
 Utredningsändamål
 Misstänkt
 Annat

Urין (Märk provrören med gula sigill)
 Cannabiz
 Amfetamin/Ecstasy
 Heroin/Morfin
 Kokain
 Benzodiazepiner
 Anabol steroider

Sally (Märk provrören med röda sigill)
 Cannabiz
 Amfetamin
 Heroin/Morfin
 Kokain
 Benzodiazepiner

Utfandningsluft (Märk filtren med blå sigill)
 Cannabiz
 Amfetamin
 Heroin/Morfin
 Kokain
 Benzodiazepiner

Läkemedel/Meddalenden

Rid 21 0220 0499

65754211441

KAROLINSKA
 Karolinska Institutet
 Medicinsk laboratoriet
 www.karolinska.se
 Tel: 08-8333 3333 Fax: 08-2358 0370

Provtagare
 Provtagningen sker i ett kontrollrum med ett drogtestprovslagring och provfaktoren från Buret skriftlig samtycke.
 Namn: _____ Sign: _____

Remissuppgifter

Kontrollera provlämnarens identitet och ange personuppgifter på remissen.
 Fyll i alla uppgifter noggrant, viktigt för rätt bedömning av provresultatet.
 Var noga att notera ev. intagna läkemedel senaste veckan.



Positiva svar till MRO

Uppge fullständig adress, om adressen inte överensstämmer med svarsmottagaren

- Vik den vita delen av remissen och lägg i det andra facket i provpåsen.
- Behåll rosa delen.
- Lämna den gula delen till provlämnaren.
- Det går bra att packa fler provpåsar + remisser i den föradresserade och förfrankerade skickpåsen.
- Förslut noggrant.
- Prover som inte skickas samma dag förvaras i kylskåp i max en vecka.

