

Provtagningsanvisning, hanteringstid ”Ö24H”

OBS! Proverna hanteras under ankomstdagen (vid ankomst innan kl. 16:00).

Provtagning sker enligt rekommenderad rörordning för Biobanksprover, se anvisning ”Rekommenderad rörordning Biobank”. Proverna får ej tas kapillärt. Rören måste fyllas tills vakuum upphör, urinrör fylls minst till hälften.

Provtagningskärl	Rapportnamn, trivialnamn	Analyskod	Extension
Citratrör glas (drar 4,5 ml), blå propp 5 ml	P-Ö24H CITRATPLASMA	BBKWC	WC
	P-Ö24H CITRATPL 2	BBKWC2	W2
	P-Ö24H CITRATPL 3	BBKWC3	WF
EDTA-rör, lila propp 5 ml	B-Ö24H EDTABLÖD	BBKWEB	WB
	B-Ö24H EDTABLÖD 2	BBKWEB2	W0
	B-Ö24H EDTABLÖD 3	BBKWEB3	WE
EDTA-rör, lila propp 5 ml	P-Ö24H EDTAPLASMA	BBKWEP	WP
	P-Ö24H EDTAPL 2	BBKWEP2	W1
	P-Ö24H EDTAPL 3	BBKWEP3	WK
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp 5 ml	P-Ö24H LIHEPPL GEL	BBKWLHG	WL
	P-Ö24H LIHEPPL GEL 2	BBKWLHG2	W3
	P-Ö24H LIHEPPL GEL 3	BBKWLHG3	WI
	P-Ö24H LIHEPPL GEL 4	BBKWLHG4	WD
Na-heparinrör, mörkblå propp 5 ml	P-Ö24H NAHEPPLASMA	BBKWNH	WN
	P-Ö24H NAHEPPL 2	BBKWNH2	W4
	P-Ö24H NAHEPPL 3	BBKWNH3	WJ
Gelrör, gul propp 5 ml	S-Ö24H SERUM GEL	BBKWSG	WG
	S-Ö24H SERUM GEL 2	BBKWSG2	W6
	S-Ö24H SERUM GEL 3	BBKWSG3	WH
	S-Ö24H SERUM GEL 4	BBKWSG4	WO
Rör utan tillsats, röd propp 5 ml	S-Ö24H SERUM	BBKWS	WS
	S-Ö24H SERUM 2	BBKWS2	W5
	S-Ö24H SERUM 3	BBKWS3	WM
EDTA-rör, lila propp 10 ml	P-Ö24H EDTAPL 10ML	BBKWE10	WA
	P-Ö24H EDTAPL 10ML 2	BBKWE102	W9
Rör utan tillsats, röd propp 10 ml	S-Ö24H SERUM 10ML	BBKWS10	WT
	S-Ö24H SERUM 10ML 2	BBKWS102	W8
Sterilt provrör m rundad botten (skruvkork) 10 ml	U-Ö24H URIN	BBKWU	WU
	U-Ö24H URIN 2	BBKWU2	W7