

Provtagningsanvisning, hanteringstid ”U24H”

OBS! Proverna hanteras under ankomstdagen (vid ankomst innan kl. 16:00). Beställningen används vid krav på infrysning inom 24 timmar från provtagning.

Provtagning sker enligt rekommenderad rörordning för Biobanksprover, se anvisning ”Rekommenderad rörordning Biobank”. Proverna får ej tas kapillärt. Rören måste fyllas tills vakuum upphör, urinrör fylls minst till hälften.

Provtagningskärl	Rapportnamn, trivialnamn	Analyskod	Extension
Citratrör glas (drar 4,5 ml), blå propp 5 ml	P-U24H CITRATPLASMA	BBKVC	VC
	P-U24H CITRATPL 2	BBKVC2	V2
	P-U24H CITRATPL 3	BBKVC3	VF
EDTA-rör, lila propp 5 ml	B-U24H EDTABLÖD	BBKVEB	VB
	B-U24H EDTABLÖD 2	BBKVEB2	V0
	B-U24H EDTABLÖD 3	BBKVEB3	VE
EDTA-rör, lila propp 5 ml	P-U24H EDTAPLASMA	BBKVEP	VP
	P-U24H EDTAPL 2	BBKVEP2	V1
	P-U24H EDTAPL 3	BBKVEP3	VK
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp 5 ml	P-U24H LIHEPPL GEL	BBKVLHG	VL
	P-U24H LIHEPPL GEL 2	BBKVLHG2	V3
	P-U24H LIHEPPL GEL 3	BBKVLHG3	VI
	P-U24H LIHEPPL GEL 4	BBKVLHG4	VD
Na-heparinrör, mörkblå propp 5 ml	P-U24H NAHEPPLASMA	BBKVNH	VN
	P-U24H NAHEPPL 2	BBKVNH2	V4
	P-U24H NAHEPPL 3	BBKVNH3	VJ
Gelrör, gul propp 5 ml	S-U24H SERUM GEL	BBKVSG	VG
	S-U24H SERUM GEL 2	BBKVSG2	V6
	S-U24H SERUM GEL 3	BBKVSG3	VH
	S-U24H SERUM GEL 4	BBKVSG4	VO
Rör utan tillsats, röd propp 5 ml	S-U24H SERUM	BBKVS	VS
	S-U24H SERUM 2	BBKVS2	V5
	S-U24H SERUM 3	BBKVS3	VM
EDTA-rör, lila propp 10 ml	P-U24H EDTAPL 10ML	BBKVE10	VA
	P-U24H EDTAPL 10ML 2	BBKVE102	V9
Rör utan tillsats, röd propp 10 ml	S-U24H SERUM 10ML	BBKVS10	VT
	S-U24H SERUM 10ML 2	BBKVS102	V8
Sterilt provrör m rundad botten (skruvkork) 10 ml	U-U24H URIN	BBKVU	VU
	U-U24H URIN 2	BBKVU2	V7