

## Provtagningsanvisning, hanteringstid "U2H"

---

**OBS!** Proverna hanteras omgående vid ankomst till laboratoriet (vid ankomst innan kl. 16:00). Beställningen används vid krav på infrysning inom 2 timmar från provtagning.

Proverna kan endast tas på provtagningscentral, avdelning eller mottagning på Karolinska Universitetssjukhusen i Solna och Huddinge samt Danderyds Sjukhus.

Provtagning sker enligt rekommenderad rörordning för Biobanksprover, se anvisning "Rekommenderad rörordning Biobank". Proverna får ej tas kapillärt. Rören måste fyllas tills vakuum upphör, urinrör fylls minst till hälften.

Proverna skickas omgående till laboratoriet förutom serumrör som skall stå 30 min innan transport till laboratoriet.

Provtagningskärl	Rapportnamn, trivialnamn	Analyskod	Extension
Citratrör <b>glas</b> (drar 4,5 ml), blå propp 5 ml	P-U2H CITRATPLASMA	BBKZC	ZC
	P-U2H CITRATPL 2	BBKZC2	Z2
	P-U2H CITRATPL 3	BBKZC3	ZF
EDTA-rör, lila propp 5 ml	B-U2H EDTABLOD	BBKZEB	ZB
	B-U2H EDTABLOD 2	BBKZEB2	Z0
	B-U2H EDTABLOD 3	BBKZEB3	ZE
EDTA-rör, lila propp 5 ml	P-U2H EDTAPLASMA	BBKZEP	ZP
	P-U2H EDTAPL 2	BBKZEP2	Z1
	P-U2H EDTAPL 3	BBKZEP3	ZK
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp 5 ml	P-U2H LIHEPPL GEL	BBKZLHG	ZL
	P-U2H LIHEPPL GEL 2	BBKZLHG2	Z3
	P-U2H LIHEPPL GEL 3	BBKZLHG3	ZI
	P-U2H LIHEPPL GEL 4	BBKZLHG4	ZD
Na-heparinrör, mörkblå propp 5 ml	P-U2H NAHEPPLASMA	BBKZNH	ZN
	P-U2H NAHEPPL 2	BBKZNH2	Z4
	P-U2H NAHEPPL 3	BBKZNH3	ZJ
Gelrör, gul propp 5 ml	S-U2H SERUM GEL	BBKZSG	ZG
	S-U2H SERUM GEL 2	BBKZSG2	Z6
	S-U2H SERUM GEL 3	BBKZSG3	ZH
	S-U2H SERUM GEL 4	BBKZSG4	ZO
Rör utan tillsats, röd propp 5 ml	S-U2H SERUM	BBKZS	ZS
	S-U2H SERUM 2	BBKZS2	Z5
	S-U2H SERUM 3	BBKZS3	ZM
EDTA-rör, lila propp 10 ml	P-U2H EDTAPL 10ML	BBKZE10	ZA
	P-U2H EDTAPL 10ML 2	BBKZE102	Z9
Rör utan tillsats, röd propp 10 ml	S-U2H SERUM 10ML	BBKZS10	ZT
	S-U2H SERUM 10ML 2	BBKZS102	Z8
Sterilt provrör m rundad botten (skruvkork) 10 ml	U-U2H URIN	BBKZU	ZU
	U-U2H URIN 2	BBKZU2	Z7